

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MACA DOBRÁVEL

Portátil



TechMec

Você Conhece, Você Confia!

MP- REV0

www.techmec.com.br

Todos os direitos reservados por:



TechMec®

TechMec Equipamentos Eletromecânicos Ltda Epp

Rua Francisco Luiz Garcia, n. 52 - Distrito Industrial II - Araras (SP) - CEP: 13.602-052

Telefone: + 55 19 3541-6407

E-mail: contato@techmec.com.br

Website: www.techmec.com.br

CNPJ: 09.246.333/0001.70

I.E: 182.176.303.115

Classificação do Produto:

Temperatura de operação: +15 a +35 °C

Equipamento não adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso.

ÍNDICE

	PÁG
1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	04
1.1. DEFINIÇÕES	04
2. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	05
3. INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA	06
4. DESCRIÇÃO	07
5. USO PRETENDIDO	08
6. MAU USO DO EQUIPAMENTO	08
7. ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS	08
8. PREPARAÇÃO PARA O USO	09
9. EXTENSOR DOS PÉS	10
10. TERMO DE GARANTIA	10

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



Leia e compreenda todas as instruções deste manual.
A utilização incorreta deste produto pode levar a ferimentos graves!

1.1. DEFINIÇÕES

O uso inadequado do equipamento sem o completo conhecimento de suas características e funções pode ocasionar risco para o operador, paciente e ao próprio equipamento.

As seguintes definições se aplicam ao longo deste manual:



AVISO / ADVERTÊNCIA / ATENÇÃO: Uma condição que pode causar lesão a um paciente ou operador se as instruções operacionais neste manual não forem seguidas corretamente.



CUIDADO: Uma condição que pode causar dano ou reduzir a vida útil do produto.



NOTA: Informação importante relativa à construção ou operação do produto.

AVISO

O descumprimento das obrigações com relação as recomendações da manutenção periódica por parte do cliente podem provocar lesões aos usuários do produto e danos a suas partes.

2. INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Antes de utilizar o equipamento pela primeira vez, leia este manual com atenção.
- Apenas indivíduos capacitados e autorizados têm permissão para operar a Maca Dobrável. Os indivíduos são autorizados após leitura e compreensão completa deste manual.
- Utilize apenas acessórios e peças de reposição fornecidos pela TechMec®.
- Nenhuma modificação neste equipamento é permitida.
- Sempre teste a estabilidade da maca e a regulagem adequada dos pés niveladores antes de iniciar um atendimento.
- Este equipamento deve ser colocado fora do alcance de crianças e animais. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo. A embalagem (por exemplo, sacos plásticos) apresenta risco de asfixia.
- Pacientes pediátricos (crianças) podem ser submetidos à terapia com a Maca Dobrável apenas sob supervisão de um operador adulto autorizado. O ajuste da maca, posicionamento do paciente e uso da mesma devem ser realizados apenas por um operador adulto autorizado que deve estar presente durante toda a terapia.
- Apesar dos esforços do fabricante da Maca Dobrável para eliminar os riscos, o dispositivo pode causar ferimentos graves, tenha cuidado em seu manuseio.
As partes móveis mecânicas representam risco de lesão (por exemplo, esmagamento, corte) de extremidades e partes do corpo. Em especial, certifique-se de que nenhum objeto ou parte do corpo sejam colocados ou possam alcançar as partes móveis e articuladas da maca.

MACA DOBRÁVEL

3. INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Este dispositivo e acessórios devem ser usados, instalados e mantidos de acordo com este manual.
- O uso da Maca Dobrável sem o conhecimento adequado das funções do dispositivo e informações do manual pode causar danos ao paciente, ao operador ou ao dispositivo.
- É a decisão do profissional capacitado utilizar ou não os recursos da Maca Dobrável em seus pacientes acometidos de patologias e dores.
- Em caso de dúvidas sobre o uso da maca ou seus recursos, interrompa imediatamente o tratamento e entre em contato com o fabricante ou profissional da área.
- Inspecione o dispositivo completamente diariamente. Procure por danos, como peças soltas / rachadas (cabos, componentes de plástico ou metal, tampas) e se as travas de segurança estão bem fixadas deixando a maca estável. Se forem encontradas quaisquer anomalias ou inconsistências, pare de usar o dispositivo, realize o procedimento de reaperto e/ou entre em contato com o fabricante.
- Se o aparelho apresentar algum defeito ou se o usuário tiver dúvidas quanto ao seu funcionamento correto e seguro, interrompa imediatamente a terapia. Se o usuário não sanar a fonte de preocupação após um estudo completo do manual do operador, ele deve entrar em contato com o fabricante. Se o dispositivo não for usado de acordo com este manual ou se for usado quando o dispositivo exibir diferenças funcionais em relação às declaradas neste manual, o usuário será responsável por qualquer dano ao dispositivo.
- O dispositivo não deve ser conectado a dispositivos ou acessórios não autorizados. Em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.
- Este dispositivo não usa ou emite quaisquer substâncias tóxicas durante sua operação, armazenamento ou transporte nas condições estabelecidas.
- O dispositivo deve ser descartado de forma comum para materiais recicláveis. Não descarte o dispositivo em recipientes de lixo normais.
- Não tente desmontar a maca e/ou suas partes sem orientação e autorização do fabricante.

AVISO

O descumprimento das obrigações com relação as recomendações da manutenção periódica por parte do cliente podem provocar lesões aos usuários do produto e danos a suas partes.



ATENÇÃO: Nenhuma modificação neste equipamento é permitida.

MACA DOBRÁVEL

4 DESCRIÇÃO



ATENÇÃO: Na reposição de partes, peças e acessórios, deve-se utilizar somente componentes genuínos TechMec®.

MACA DOBRÁVEL

5 USO PRETENDIDO

A Maca de Drop é um equipamento para atendimentos clínicos onde o profissional pode aplicar seus conhecimentos e técnicas manuais, com o paciente deitado sobre o equipamento, a fim de tratar suas lesões e buscar melhora em suas funções.

6 MAU USO DO PRODUTO


- Não sentar sobre extensor-prolongador dos pés
- Não sentar sobre o módulo cervical
- Não ficar em pé em cima da maca
- Nunca utilize o equipamento sem que os 4 pés de apoio estejam adequadamente abertos
- Nunca utilize o equipamento sem que todos os 4 pés niveladores estejam adequadamente regulados

AVISO


O descumprimento das obrigatoriedades com relação as recomendações da manutenção periódica por parte do cliente podem provocar lesões aos usuários do produto e danos a suas partes.

7 ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Altura : 68 cm
 Espessura : 17 cm
 Comprimento : 92 cm
 Peso: aprox.: 20,5 kg


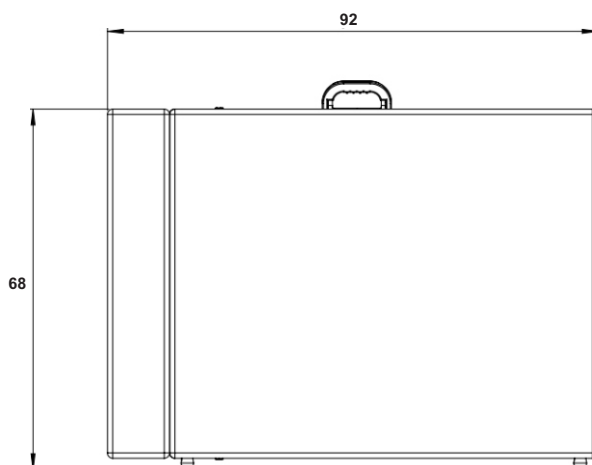


MACA FECHADA

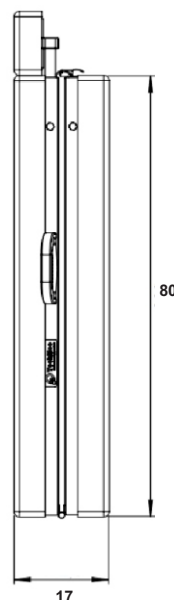

Alturas Reguláveis: 46 - 56 - 66 cm
 Largura : 65 cm
 Comprimento Total: 197 cm

MACA FECHADA

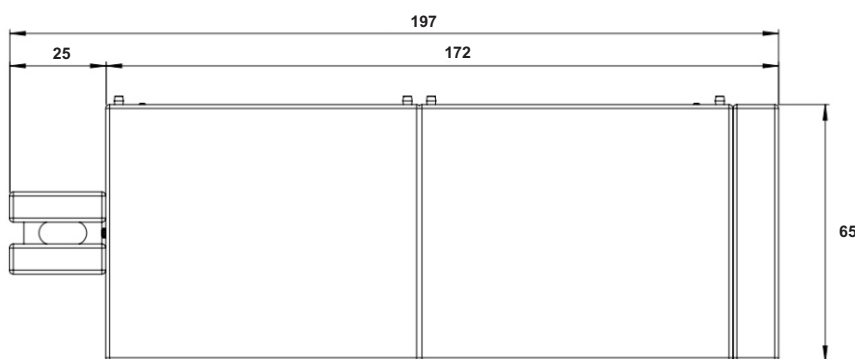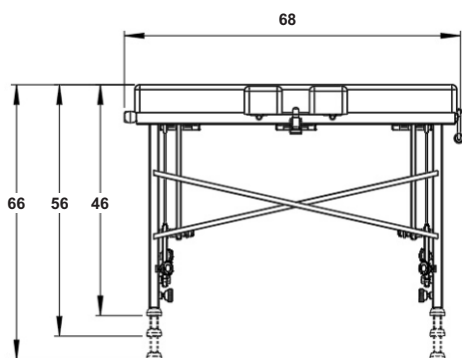

MACA DOBRÁVEL

8 PREPARAÇÃO PARA O USO

a) Retire o equipamento da embalagem e posicione a maca em pé, com os 4 pés de apoio em contato com o piso, conforme a imagem ao lado.

b) Solte o fecho de travamento (9) localizado na parte inferior da maca, perto do estofamento extensor-prolongador dos pés (4).

c) Faça a abertura da maca e retire estofamento da cabeceira localizado na parte interna (1).

d) Abra os dois pés articulados (5) deixando-os em posição reta e vire a maca até que os pés fiquem em contato com o solo.

e) Faça a regulagem dos 4 pés niveladores da maca (6) girando as sapatas no sentido horário até que todas fiquem em total contato com o solo, não havendo espaço entre as partes. Realize um teste balançando a maca para verificar se a mesma está balanceada e estável e se necessário, realize um novo ajuste nos pés niveladores individualmente.




Este procedimento é extremamente importante para que o equipamento trabalhe de forma correta e não cause danos e quebras aos seus componentes. É através desta regulagem que a maca ficará segura e estável para realização dos atendimentos.

AVISO

O descumprimento das recomendações deste manual podem resultar em danos irreversíveis ao equipamento.

f) Insira a cabeceira na parte frontal da maca através dos dois furos guia existentes no local conforme imagem abaixo:

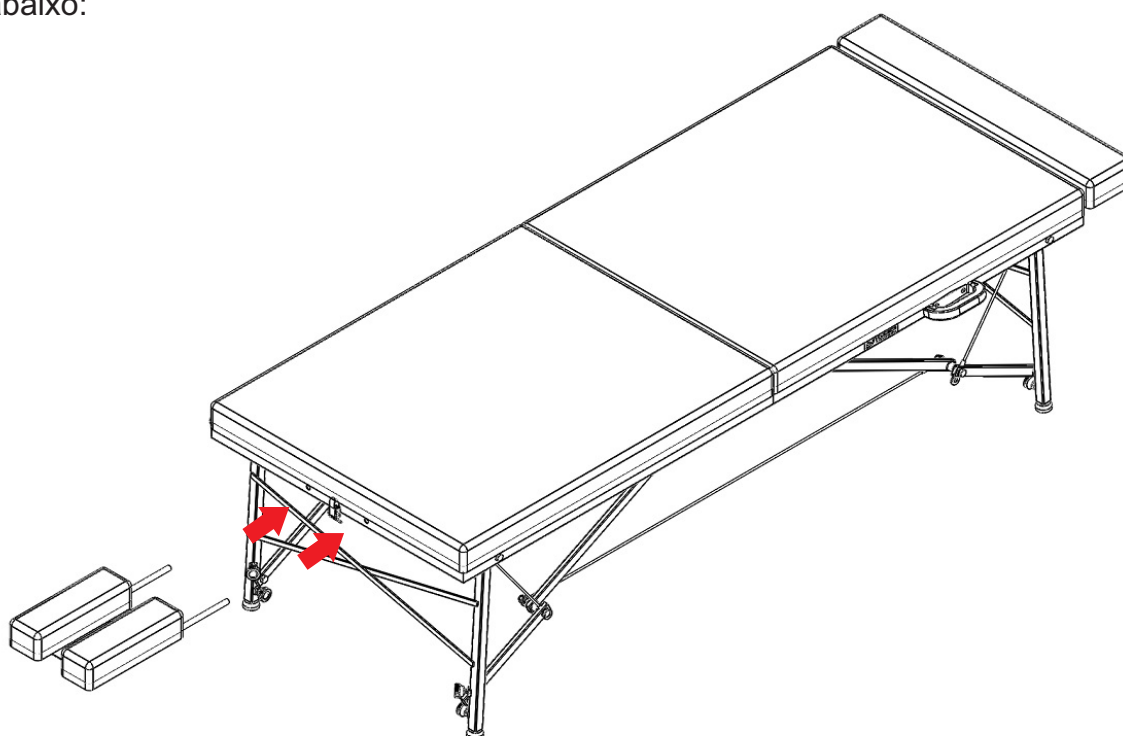


MACA DOBRÁVEL

9 EXTENSOR / PROLONGADOR DOS PÉS

Sua maca está equipada com o extensor dos pés por onde você poderá regular o apoio conforme estatura de cada paciente acomodado. Basta puxar o estofamento dos pés para trás na posição desejada.



CUIDADO: Este componente é projetado somente para suportar o apoio dos pés, não sendo indicado para que outras forças sejam aplicadas sobre ele, com risco de quebra e danos ao mesmo.

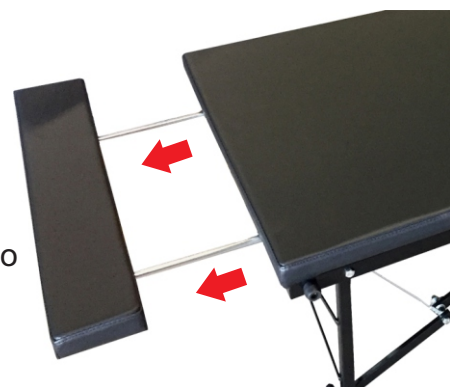

10 TERMO DE GARANTIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do Cliente: _____

Endereço: _____

Complemento: _____

Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ CEP: _____

Data da Compra: ____ / ____ / ____ Nota Fiscal: _____

Nº de Série: _____

Equipamento: _____

Obs.: _____



TechMec

Você Conhece, Você Confia!

TechMec Equipamentos Eletromecânicos Ltda Epp

Rua Francisco Luiz Garcia, n. 52 - Distrito Industrial II - Araras (SP) - CEP: 13.602-052

Telefone: + 55 (19) 3541-6407

E-mail: contato@techmec.com.br - Website: www.techmec.com.br

CNPJ: 09.246.333/0001.70 - I.E: 182.176.303.115